

FICHE TECHNIQUE

Code article : MI006215

COLLECTEUR AIGUILLES 0,6L BIO SECURE+ DASRI NFX 30-511

CODE DOUANIER 39233010

DESCRIPTION

**COLLECTEUR AIGUILLES 0.6L BIO SECURE
DASRI NFX 30-511 POUR LA GESTION DES
DÉCHETS COUPANTS, TRANCHANTS ET
PIQUANTS**



AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux : Hôpitaux, établissements de soins et usage domestique
- Petit collecteur transportable très pratique pour la collecte de déchets à risques infectieux piquants, coupants ou tranchants.
- Haute résistance aux chocs
- Le couvercle et la boîte s'assemblent au moyen d'un ajustement pyramidal extrêmement souple.
- Triple système de désolidarisation des aiguilles.
- Fermeture provisoire et définitive facile à utiliser.
- Grande résistance aux chocs et aux perforations.
- Système de montage facile du couvercle et de la boîte.
- Différents supports disponibles : mur, barre et surface.
- Spécialement conçu pour optimiser l'espace pendant le transport, aussi bien vide que plein.
- Fabriqué avec des solutions fiables et efficaces basées sur les technologies renouvelables les plus avancées.

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristalhygiene.com/>

CARACTÉRISTIQUES

Norme NFX 30-511 - ADR (UN3291) / ISO 23907-1: 2019 / NF 302

Dimensions : 9 x 9 x 12.3 cm


Matière : Polypropylène copolymère résistant aux chocs 100 % recyclable.

Couleur : Jaune avec couvercle blanc

Contenance : 0.6L



1 ASSEMBLAGE COUVERCLE ET BOÎTE

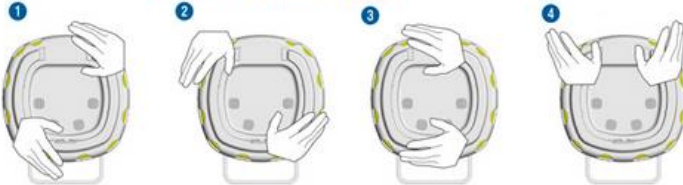

Alignez le couvercle sur le collecteur. Pour assembler le couvercle avec le collecteur appuyez sur les coins, selon le dessin, et ensuite sur les côtés jusqu'à entendre « clic »

COUVERCLE OUVERT: LIBERATION DU COUVERCLE




Appuyez sur la languette pour libérer le couvercle

FERMETURE PROVISOIRE



Placez le couvercle en position de fermeture provisoire jusqu'à entendre le premier « clic »

FERMETURE DÉFINITIVE

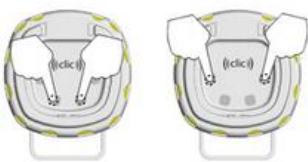

Pour fermer définitivement le collecteur, appuyez avec les pouces sur les empreintes situées sur le couvercle, comme indiqué sur le dessin, jusqu'à entendre le « clic » de fermeture définitive.


Une fois le conteneur fermé définitivement, il peut être transporté par sa poignée.

SYSTÈME DE DÉSOLIDARISATION DES AIGUILLES



Système de désolidarisation d'aiguilles standard et aiguilles à stylo

OUVERTURE ADAPTABLE

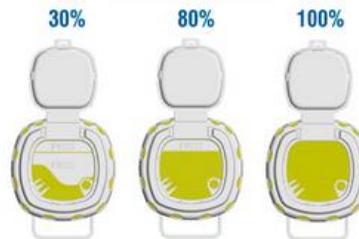

L'ouverture du couvercle peut-être adaptée en appuyant et éliminant les languettes « PRESS »



NE JAMAIS DÉPASSER LA LIMITE DE REMPLISSAGE

0,6 L: Masse brute maximale à ne pas dépasser: 0,4 kg
1 L: Masse brute maximale à ne pas dépasser: 0,7 kg

OBLIGATION DE SUPPORT



Organisme certificateur: L.N.E. 1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris

DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX CONFORME À LA NORME ISO 23907-1: 2019 CONFORME POUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES ATTENTION: NE JAMAIS FORCER POUR L'INTRODUCTION DES DÉCHETS DÉCHETS À ÉLIMINER CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR NON AUTOCLAVABLE

CONDITIONNEMENT : Carton de 150 U – Palette de 2700 U

Mis à jour le 08 octobre 2025

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristalhygiene.com/>